

## OZONE DTA - indikačná tabuľka

Použitie / Diagnóza	Sonda č.	Intenzita/ tlačidlo	Čas v sek.	Opakov.	Odstup v dňoch	
<b>Gingiva/ paradont</b>	Parodontis	1	8-15	30-40 každá kapsa	3-5	2-3
	Gingivitis	3	6-12	~ 30 pre každú pozíciu	3-5	2-3
	Gingivitis desquamativa	3	3 - 6	~ 60 pre každú pozíciu	> 6	2-3
	Periimplantis	1 + 2	8-15	40-60	2-3	2-3
<b>Zub/ pulpa</b>	Perforácia pulpy	4 alebo 5	8-12	~ 40	1	
	Gangréna pulpy	5	8-15	60-80	1-3	3
	Caries superficialis (fisury)	1 alebo 2	8-15	30-40		
	Caries media et profunda (po preparácii)	4 alebo 5	8-15	30-40	1	
<b>Chir. ošetrenie pred/ po</b>	Alveolitis (bolesť po extrakcii)	4	6-15	40-60	1-3	1-2
	Stavenie silného krvácania	3 + 4	6-15	~ 60	1	
	Preoperatívna dezinfekcia poľa	3 + 4	8 -12	40 -60 každá pozícia	1	
	Inoperatívna dezinfekcia okolia rany	3 + 4	10 -15	30 -40 každá pozícia	1	
	Postoperatívne ošetrenie ihneď po OP zákroku lebo zlom hojení	3 + 4	10 -15 3- 8	30 -40 každá pozícia	1 3 -6	2-3
<b>Iné</b>	Afty (Herpes)	3	10 -15	30 -40	2 -3	1

Dermatológia (sonda č.3 ): ekzémy, otvorené rany, popáleniny, akné, ulcus cruris, kožné lézie, dekubity, artritída, veruca vulgaris, hematómy